



# DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

## GEBRUIKSAANWIJZING BARIVA DOUCHEBRANCARD

### Hoofdsteun

Aan beide zijden van de douchebrancard bevindt zich halverwege een hendel voor de hoofdsteun. De plek is aangegeven met een sticker.



**Omhoog:** Duw met één hand de hendel omhoog tegen het ligvlak en trek met uw andere hand het handvat van de hoofdsteun omhoog. Als de gewenste hoogte is bereikt, kan de hendel worden losgelaten en daarna pas de hoofdsteun.




**Omlaag:** Duw met één hand de hendel omhoog tegen het ligvlak aan en duw met uw andere hand het handvat van de hoofdsteun omlaag. Als u de gewenste hoogte heeft bereikt, dan kunt de hendel loslaten en daarna de hoofdsteun.



### Zijhekken


**Omhoog:** Trek het zijhek omhoog totdat het vastklikt. Controleer of ze vastzitten.

**Omlaag:** Aan weerszijde van de douchebrancard zitten twee zwarte hendels. Pak met één hand het veiligheidshek vast en knijp met de andere hand beide zwarte hendels naar elkaar toe en laat het veiligheidshek zakken.

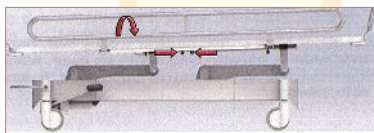

### Verplaatsen van de douchebrancard

Het rempedaal werkt centraal op de 4 wielen en kan in 3 standen gezet worden.

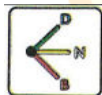

Pedaal omhoog: 3 wielen kunnen vrij roteren, 1 geeft richting aan

Pedaal neutraal: alle wielen kunnen vrij roteren

Pedaal omlaag: alle wielen zijn vergrendeld.

**Rijden met de douchebrancard** → trek de zijhekken omhoog en vergrendel het richtingswiel door het rempedaal omhoog te zetten.

**Douchebrancard verplaatsen naar links of rechts** → alle wielen dienen vrij te roteren. Ze het rempedaal vrij in de neutrale positie.

**Douchebrancard tijdens gebruik** → blokkeer de wielen door het rempedaal naar beneden te duwen. NB: de wielen mogen in geblokkeerde stand nooit naar binnen gericht te zijn.

**CE** Fabrikant:  
**TIMO d.o.o.**  
Vipavska cesta 4i  
5270 AJDOVŠČINA  
Slovenië

# DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

### Ligvlak

Aan de onderzijde van de douchebrancard zit een pedaal waarmee het liggedeelte omhoog en omlaag verplaatst kan worden.

**Omhoog:** Duw continu op het pedaal tot de gewenste hoogte is bereikt.




**Omlaag:** Breng het pedaal langzaam met de voet omhoog tot de gewenste hoogte is bereikt.



### Ligvlak 90 graden kantelen (optie bij de Bariva met 1-delig ligvlak)

Hou met één hand het ligvlak vast en met uw andere hand de hendel om het ligvlak omhoog te kantelen.

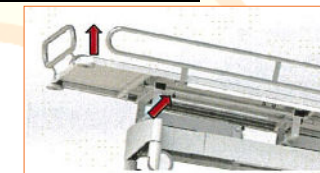

Om het ligvlak weer omlaag te brengen dient het ligvlak vastgehouden te worden en teruggeduwd in de horizontale positie totdat het ligvlak vastklikt.

### Mogelijke storingen

Storing	Oorzaak	Mogelijke oplossing
De hoofdsteun wil niet omhoog, ook al wordt de hendel ingedruwd (alleen bij Bariva met 2-delig ligvlak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zeer grote belasting op de hoofdsteun</li> <li>2. Schade aan de gasveer</li> <li>3. Schade aan de hendel</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verminder het gewicht op de hoofdsteun en probeer het opnieuw</li> <li>2. Neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep</li> <li>3. Neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep</li> </ol>
De remblokkering werkt niet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schade aan de wielen</li> <li>2. Schade aan het rempedaal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &amp; 2. Neem contact op met de technische dienst van Doove Care Groep</li> </ol>
Het ligvlak gaat niet omhoog	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hydraulisch cilinder is mogelijk beschadigd</li> <li>2. Het pedaal is geblokkeerd</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laad de accu op of bel de technische dienst van Doove Care Groep</li> <li>2. Probeer het pedaal een aantal keren om te zien of het ligvlak alsnog omlaag of omhoog wil gaan. Lukt dat niet, bel dan de technische dienst van Doove Care Groep</li> </ol>

Indien de douchebrancard niet werkt, raadpleeg dan bovenstaande tabel om de storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u aan de hand van bovenstaande informatie het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.