



DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 – 624 990

GEBRUIKSAANWIJZING EUROMAT PRO

Touchscreen



Kort programma

Normaal programma

Intensief programma

Afvoerprogramma

Ingebruikname


Controleer voor iedere reinigingscyclus

- de reinigingskamer, spoeldouche, roterende spoelarm en afvoer op papierresten en vervuiling.
- de soepelheid van de roterende spoelarm.
- controleer aan de hand van het display of het apparaat gebruiksklaar is
- of de spoelkamerdeur makkelijk te openen en te sluiten is.

Inruimen van de Euromat Pro

Urineflessen worden met de opening naar voren door de linkszijdige houder tot aan de aanslag geschoven.

Ondersteken en toilettemmers worden met de opening naar boven in het rek geplaatst. De deksels van de ondersteken kunnen eveneens in het rek worden geplaatst (handgreep wijst daarbij naar de deur). Bij het sluiten van de deur leegt het vaatwerk zich zelfstandig.

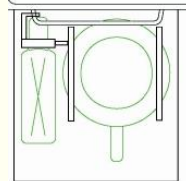

Deurvergrendeling

De deur is gedurende het totale reinigingsproces vergrendeld en opent zich pas na een succesvolle reiniging, desinfectering en afkoeling. Het gekozen programma wordt in het display weergegeven. Bij het optreden van een fout blijft de deur vergrendeld.

NB: Gedurende de desinfecteringsfase wordt de deur iets warmer. Bij aanraking bestaat echter geen verbrandingsgevaar. De handgreep van de deur behoudt ook bij gebruik van het apparaat ongeveer de kamertemperatuur.



Fabrikant:
BG-Edelstahl
Karlstraße 18
45739 Oer-Erkenschwick
Duitsland

DOOVE CARE GROEP

Bij storingen kunt u bellen naar

0182 - 624 990

Reinigingsprogramma's

In ieder programma wordt het vaatwerk voorgespoeld, gereinigd en gedesinfecteerd en aansluitend door een volgende spoeling afgekoeld, zodat de te reinigen objecten na het programma-einde direct uitneembaar en weer inzetbaar zijn. Bij het reinigingswater wordt automatisch het ontkalkingsmiddel Steckuron toegevoegd om het apparaat langdurig te kunnen gebruiken ondanks alle verschillende water hardheidsgraden. De Steckuron houder bevindt zich in de kast onder de spoelkamer



Kort programma; voor het reinigen en desinfecteren van urineflessen, ondersteken of toilettemmers met vloeibare inhoud. Het programma gebruikt een verkorte spoeltijd, bij een gelijke desinfecteringsprestatie.



Normaal programma; Voor het reinigen en desinfecteren van normaal vervuilde ondersteken of toilettemmers. Het programma heeft een gemiddelde spoeltijd bij gelijke desinfecteringsprestatie.



Intensief programma; voor het reinigen en desinfecteren van sterk vervuilde ondersteken en toilettemmers. Het programma heeft een verlengde spoeltijd, bij een gelijkblijvende desinfecteringsprestatie.



Afvoerprogramma

Als de Euromat Pro is voorzien van een afvoer, dan kan middels deze knop de ringspoeling van de afvoer worden geactiveerd. Het koud waterverbruik is ongeveer 5 liter.

Gebruiksmeldingen

Tijdens het gebruik kunnen de verschillende fasen van de gekozen programma's op het display worden gevolgd. Storingen en gebreken worden tevens op het display weergegeven.

Indien na de hele cyclus geen foutmeldingen op het display zichtbaar zijn, wordt het reinigingsprogramma met succes afgesloten. De deur is tijdens het hele reinigingsproces vergrendeld en kan pas na een succesvolle reiniging, desinfectie en afkoeling worden geopend. Het spoelgoed heeft dan een temperatuur van 40 °C, is onmiddellijk weer beschikbaar en gebruiksklaar. Het spoelgoed moet daarna visueel worden gecontroleerd om de reinigingsprestatie te controleren en daarna correct worden opgeborgen om een nieuwe contaminatie te voorkomen.

Indien er storingen voorkomen, wordt de deurvergrendeling niet vrijgegeven en een nieuw programma gestart. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een stroomuitval tijdens de reinigingscyclus. Indien een ernstige storing zich voordoet, die ertoe leidt dat een herhaling van het proces niet mogelijk is, blijft de deur vergrendeld en dient u contact op te nemen met Doove Care Groep.