



DOOVE CARE GROEP

Meld een storingen via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 - 624 990


GEBRUIKSAANWIJZING NORA ACTIEVE TILLIFT

Voor het eerste gebruik moet de batterij volledig opgeladen worden (oplaadduur +/- 4 uur). Om de ophangbeugels voor de tilband omhoog/ omlaag te kunnen bewegen moet de noodstopknop ontgrendeld zijn. (draai de knop naar rechts).

Handbediening

De verschillende functies van de NORA kunnen met de handbediening uitgevoerd worden. De ophangbeugels kunnen omhoog (3)/ omlaag (4) en het onderstel kan gespreid (6)/gesloten (5) worden.

Als het maximumgewicht van 200 kg bereikt is, brandt de LED "MAX" (2) en wordt de besturing uitgeschakeld. De handbediening geeft de laadtoestand van de batterij aan (7). Wanneer de LED "Service"(1) knippert is het tijd voor een onderhoudsbeurt.

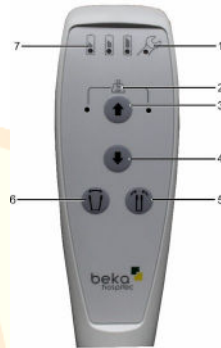

Beensteunen

De geïntegreerde beensteunen zijn in hoogte verstelbaar. De veiligheidsgordels om de benen moeten tijdens het oprichten gesloten blijven.

Ophangbeugels van de tilband

De ophangbeugels voor de tilband beschikt over 4 bevestigingspunten, zodat hij voor cliënten van diverse lengtes gebruikt kan worden. De oranje omcirkelde bevestigingspunten zijn bedoeld voor cliënten tot 160 cm.



De nooddaling activeren

Bij storing is het altijd mogelijk om de cliënt te laten dalen.

1. Manueel: Schuif de rode veiligheidsvergrendeling in de richting van de pijl naar boven. De motor begint langzaam naar beneden te zakken en stopt zodra de veiligheidsvergrendeling wordt losgelaten.



2. Elektrisch: Als de handbediening defect is/niet functioneert en de batterij nog voldoende opgeladen is, is het mogelijk de ophangbeugels te bedienen via de besturing. Steek een pen in het gaatje voor omhoog of omlaag.



Fabrikant:
BEKA Hospitec GmbH
Am Rübenmorgen 3
35582 Wetzlar
Duitsland


DOOVE CARE GROEP

Meld een storingen via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 - 624 990

Noodstopknop

Als de noodstopknop ingedrukt wordt, stoppen de motoren onmiddellijk. De noodstop mag alleen gebruikt worden als er gevaar dreigt voor de patiënt of bedienend personeel. De noodknop kan ook gebruikt worden om het ontladen van de batterij te verminderen wanneer de lift niet gebruikt wordt.

Draai de knop naar rechts om de noodstop te ontgrendelen.

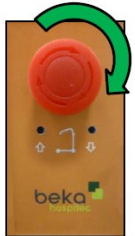

Een cliënt vanuit zittende positie optillen

1. Vanuit bed: zet de cliënt rechtop en draai hem/haar zo dat de voeten de vloer raken en hij/zij een stabiele zitpositie heeft.
Vanuit de rolstoel: zet de remmen van de rolstoel vast.
2. Doe de cliënt de tilband aan; leg het ruggedeelte achter de cliënt en sluit het buikgedeelte met de clipsluiting. Zorg ervoor dat de grootte van de tilband aan de cliënt aangepast is en dat de armen van de cliënt zich aan de buitenkant van de tilband bevinden.
3. Spreid de poten van het onderstel en laat de beugel volledig zakken.
4. Plaats de NORA zo voor de cliënt dat de benen van de cliënt tegen de beensteunen rusten en een rechte hoek vormen met de dijbenen. De voeten moeten in het midden van de voetplaat geplaatst worden.
5. Zet de wielen van de NORA vast met behulp van de remmen.
6. Sluit de veiligheidsgordels voor de benen en span ze aan.
7. Breng de ophangbeugel op de juiste hoogte om de tilband in de bevestigingspunten te kunnen hangen.
8. Hang de tilband in de bevestigingspunten (de achterste zijn bedoeld voor cliënten tot 1.60 m) en zorg ervoor dat deze stevig vasthangt.
9. De cliënt kan nu opgetild worden.
10. Zorg ervoor dat de cliënt zich tijdens het optillen aan de greep van de ophangbeugel vasthoudt.
11. Haal de lift van de rem voordat u de cliënt gaat verrijden.
12. Tijdens het verrijden moet het onderstel van de NORA gesloten zijn.
13. Het is gemakkelijker om de tillift te laten zakken als het onderstel gesloten is.

Storingen

Raadpleeg bij problemen met de NORA de uitgebreide handleiding.

Als het niet lukt om fouten/ storingen te verhelpen kunt u contact opnemen met Doove Care Groep.