



DOOVECAREGROEP

Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 – 624 990

GEBRUIKSAANWIJZING RAY-E BEDDENKANTELAAR

De Ray-E beddenkantelaar is een mobiele elektrische 90 graden beddenkantelaar. Met de Ray-E beddenkantelaar kunnen op eenvoudige wijze hoog/laag bedden worden gekanteld en verplaatst, zonder fysieke inspanning of belasting.

1. Bed voorbereiden

Alvorens de Ray-E beddenkantelaar kan worden gebruikt, moet het te kantelen bed worden ontdaan van losse onderdelen, zoals matras, bedlampje of papegaai. Verder moet worden gecontroleerd of het bed van de stroomvoorziening is afgehaald.

Het te kantelen bed moet op de rem worden gezet en de eventuele zijhekken moeten in de hoogste stand worden gezet. De afstandsbediening moet over een zijhek heen op het ligvlak worden gelegd.

2. Bed plaatsen op de Ray-E beddenkantelaar

1. Zet de wieltjes op de rem. Beide wielen moeten dwars ten opzichte van de beddenkantelaar staan en op de rem worden gezet.
2. Kantel vervolgens de Ray-E op de kleine wieltjes en rij hem boven en onder het bed, totdat hij niet verder kan. Let er daarbij wel op dat de Ray-E goed aansluit op het bed.
3. Zet vervolgens de klauwen vast op de uiteinden. Let er op dat de klauwen goed vastzitten door middel van de snappersluiting.



CE Fabrikant:
TechniCare
Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk
Nederland

DOOVECAREGROEP

Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 – 624 990

4. Vervolgens kan de Ray-E met bed worden gekanteld door middel van de handbediening.
5. Hou tijdens het kantelen het bed vast en begeleid het in de richting van de Ray-E (niet duwen). Let op: het bed blijft in een hoek van 20 graden staan.
6. Duw vervolgens het bed handmatig helemaal op zijn zijkant. Daarna kan door middel van de handbediening het onderstel van de Ray-E worden opgeklapt.



3. Bed op zijn plaats zetten vanaf de Ray-E beddenkantelaar

1. Zorg er voor dat de wielen van de Ray-E weer naar buiten wijzen en op de rem staan.
2. Laat vervolgens het onderstel zakken door middel van de handbediening. Let op: het bed blijft in een hoek van 20 graden staan.
3. Duw het onderstel van de Ray-E helemaal naar beneden.
4. Vervolgens kan het bed met de handbediening weer verder naar beneden worden gebracht.
5. Maak de klauwen los en rijd de Ray-E onder het bed vandaan.
6. Zet de Ray-E vervolgens weer recht op en zet de klauwen op de daarvoor bestemde plaats.

