

GEBRUIKSHANDLEIDING

TOBA 2

Elektrisch in hoogte verstelbare en elektrische kantelbare
douche- en toiletstoel





Inhoudsopgave	pagina
1. Productomschrijving	4
1.1 Bedoeld gebruik	4
2. Algemene waarschuwingen	5
3. Diverse onderdelen en functionaliteiten	6
3.1 Wielen	6
3.2 Voetplaat	6
3.3 Zitting	8
3.4 Armsteunen	8
3.5 Hoofdsteun	9
3.6 Elektrische bediening	9
3.6.1 Handbediening	9
3.6.2 Accu	10
4. Schoonmaak	11
5. Service en Onderhoud	12
6. Technische specificaties	13
7. CE Verklaring	14



1. Productomschrijving

De TOBA 2 is de nieuwe generatie TOBA douche- en toiletstoel en ontworpen om cliënten op een veilige, geborgen en ergonomische manier te wassen en te verzorgen. Gebruik van de TOBA 2 is gericht op een gebruik in ziekenhuizen, zorginstellingen en andere gezondheidsinstellingen.

De TOBA 2 bezit een aantal unieke elementen welke de veiligheid voor cliënt en zorgverlener vergroten. Hierbij valt te denken aan het centrale remsysteem, waardoor zowel cliënt als zorgverlener altijd zeker is dat alle vier de wielen geremd zijn. Hierdoor worden potentiële risico's vermeden.

In combinatie met diverse accessoires kan de TOBA 2 worden uitgerust naar wens en situatie voor de cliënt. Hierbij valt te denken aan het plaatsen van een hoofdsteen, maar bijvoorbeeld ook aan het plaatsen van extra pelotten, zodat de cliënt te allen tijde goed gepositioneerd is.

De TOBA 2 is opgebouwd uit RVS onderdelen en een staal gecoat frame met een antibacteriële nabehandeling. Dit zorgt voor een lange levensduur van de TOBA 2, waardoor wij enerzijds een optimaal hygiëne niveau en anderzijds een lange levensduur kunnen bieden. Dit heeft de TOBA 1 douchestoel inmiddels al bewezen.

De verwachte technische levensduur van de TOBA 2 is 10 jaar, mits de douche- en toiletstoel dagelijks goed onderhouden wordt en jaarlijks wordt geserviced door technici. Hierin bieden wij de mogelijkheid om PUR onderdelen op zichzelf te wisselen, waardoor u altijd geborgd bent van bijv. een schone zitting.

1.1 Bedoeld gebruik

De TOBA 2 heeft als beoogd gebruik het op een ergonomische manier wassen en verzorgen van cliënten binnen een veilige zorgomgeving.



2. Algemene waarschuwingen

Om de TOBA 2 goed te gebruiken, is het belangrijk onderstaande waarschuwingen en instructies goed op te volgen.

Het is niet toegestaan zelfstandig aanpassingen te verrichten of accessoires te plaatsen op de TOBA 2.

- Controleer voor gebruik uw omgeving op mogelijk gevaarlijke situaties.
- Controleer voordat u de cliënt in de TOBA 2 plaatst of de douchestoel centraal geremd is. Dit doet u door te voelen of de TOBA 2 niet te verrijden is. De douchestoel dient tijdens gebruik altijd geremd te zijn.
- Controleer voorafgaand aan het liften of kantelen of de armleuningen van de TOBA 2 neergeklapt en naar voren zijn. Dit zorgt voor geborgenheid en veiligheid voor de cliënt.
- Zorg ervoor dat de cliënt na plaatsing op de TOBA 2 zijn/haar benen geplaatst heeft op de voetplaat, en zijn/haar armen geplaatst heeft op de armleuningen.
- Zorg ervoor dat de voeten van de cliënt plat en recht op de voetplaat zijn geplaatst. Dit voorkomt knelgevaar.
- Zorg indien nodig voor het correct plaatsen van de pelotten voor een ergonomische en veilige zithouding voor de cliënt.
- Het is enkel toegestaan de TOBA 2 te verrijden met cliënt wanneer deze op de laagste positie is gezet. Het is niet toegestaan de TOBA 2 te verrijden wanneer stoel verhoogd is, danwel is gekanteld.
- Zorg ervoor dat voor gebruik de accu van de TOBA 2 afdoende is opgeladen in het daarvoor meegeleverde oplaadstation. De indicatoren op de accu geven de accuduur aan. Zorg ervoor dat er minimaal 2 streepjes voorafgaand aan de behandeling groen gekleurd zijn.
- De accu geeft een signaal wanneer service benodigd is. Contacteer hiervoor Doove Care Groep om de service en onderhoud van de TOBA 2 in te plannen.
- De TOBA 2 mag enkel gebruikt worden op vlakke ondergronden. Het is niet toegestaan de TOBA 2 te gebruiken op ondergronden met een hellingsgraad van +10 graden.
- Voorafgaand aan het gebruik van de TOBA 2 dient u de beschikbare [instructievideo](#) te hebben bekeken.



3. Diverse onderdelen en functionaliteiten

In onderstaande alinea's is uitgewerkt hoe de diverse onderdelen gebruikt worden. De volgende onderdelen worden besproken:

1. Wielen
2. Voetplaat
3. Zitting
4. Armsteunen
5. Hoofdsteun
6. Elektrische bediening
7. Accu

3.1 Wielen

Zoals aangegeven biedt de TOBA 2 een centraal remsysteem. Middels het indrukken van het rempedaal worden alle vier de wielen tegelijkertijd centraal geremd. Dit zorgt voor extra stabiliteit, zekerheid en daarmee veiligheid.



WAARSCHUWING: Voor gebruik van de TOBA 2 dient deze altijd geremd te zijn.



3.2 Voetplaat

De voetplaat is voorzien van een anti-slip coating, zodat dit voor de cliënt veiligheid en vastigheid biedt. De voetplaat is instelbaar, opklapbaar en uitneembaar.

Instelbaar

De hoogte van de voetplaat is instelbaar met mogelijkheid tot op de grond. Mobiele cliënten kunnen daardoor eenvoudig plaatsnemen op de TOBA, zonder dat de zorgverlener hoeft te bukken om de voetensteun op te klappen.

Middels de twee vleugelbouten aan de achterzijde is de voetplaat in te stellen op hoogte. De totale verstelling is 120mm. Door beide vleugels los te draaien, kunt u de voetplaat in hoogte verstellen.

WAARSCHUWING: Let erop dat na het instellen de vleugelbouten goed worden vastgedraaid.



WAARSCHUWING: Let op knelgevaar van voeten van de cliënt en op vingers van de verzorgende.





Opklapbaar

De voetensteun is daarnaast ook op te klappen. Dit doet u eenvoudig door de voetplaat te pakken en richting het frame te kantelen. Hierbij zijn geen verdere bedieningsknoppen etc. benodigd.

WAARSCHUWING: Let op knelgevaar van voeten van de cliënt en op vingers van de verzorgende.



Afneembaar

Naast de opklapbaarheid en instelbaarheid is de voetplaat ook afneembaar. De voetplaat is af te nemen door aan beide zijde onder het zitkussen de arreteerknoppen uit te trekken. Nu is de voetplaat los en kunt u het geheel verwijderen.

Het terugplaatsen van de voetplaat werkt in tegenovergestelde richting. Zorg er hierbij altijd voor dat de voetplaat goed is teruggeplaatst. U moet aan beide zijde een zogenaamde 'klik' horen.

WAARSCHUWING: Let op knelgevaar van voeten van de cliënt en op vingers van de verzorgende.



WAARSCHUWING: Let op dat de voetplaat goed is teruggeplaatst.





3.3 Zitting

De zitting van de TOBA 2 is gemaakt van PUR materiaal. Dit materiaal is goed schoon te maken én biedt de cliënt ook de nodige comfort. De zitting is voorzien van een sleutelgat, zodat deze ook gebruikt kan worden als toiletstoel.

De zitting is compleet afneembaar, zodat ook het frame van de TOBA 2 goed te reinigen is.

Daarbij biedt de zitting een mogelijkheid om diverse ondersteunen en bedpannen te plaatsen onder de zitting. Middels een nette uitsparing passen 95% van alle ondersteunen direct onder deze zitting.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de zitting goed geklemd is op het frame voordat de cliënt plaatsneemt op deze zitting.



3.4 Armsteunen

De armsteunen van de TOBA 2 bieden de cliënt veiligheid en geborgenheid. Doordat deze opklapbaar en wegklapbaar zijn blijft het daarnaast mogelijk en eenvoudig om transfers naar en van de TOBA 2 te verzorgen.

De oranje gedeeltes van de armsteun zijn opklapbaar. Hierdoor is het voor de cliënt mogelijk een uitstap naar voren te realiseren, zonder dat de armsteunen nog in de weg zitten.

De armsteunen kunnen ook volledig naar achter worden weggeklapt. Dit biedt het voordeel dat de cliënt vrij is om uit de TOBA 2 te komen, ofwel op eigen kracht, ofwel via bijvoorbeeld een plafond- of tillift.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat ten tijde van het verzorgen en wassen de armsteunen altijd naar beneden zijn geklapt en dat deze voor de cliënt zijn geplaatst.





3.5 Hoofdsteen

De hoofdsteen van de TOBA 2 is naar 100% eigen wens in te richten. De hoofdsteen heeft de volgende verstelmogelijkheden:

- Hoogteverstelling
- Naar voren/achter verstelling
- Breedte verstelling
- PUR hoofdkussens naar eigen wens te vormen voor de beste ondersteuning van de cliënt.

De verstellingen van de hoofdsteen worden vastgezet middels vleugelbouten.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat ten tijde van het verzorgen en wassen de hoofdsteen goed is vastgezet op alle posities.



3.6 Elektrische bediening

De TOBA 2 heeft een elektrische hoog/laag bediening en een kantelverstelling.

De elektrische componenten van de TOBA 2 zijn allen voorzien van de modernste accu's en motoren.

3.6.1 Handbediening

De TOBA 2 is voorzien van een handbediening. Via deze handbediening kunt u de TOBA 2 zowel in hoogte verstellen als kantelen. De hoogteverstelling is 500mm, de kantelverstelling biedt een uitstapstand (kleine kanteling naar voren) en een achterwaartse kantelverstelling tot 15 graden.



3.6.2 Accu

De accu biedt u de volgende inzichten:

- Links ziet u drie groene streepjes. Dit betekent dat de accu volledig is opgeladen. Zorg ervoor dat bij gebruik minimaal 2 van de 3 streepjes groen zijn. Zodoende bent u zeker dat u de cliënt goed kunt wassen en verzorgen.
- In het midden ziet u twee bedieningsknoppen. Middels deze knoppen heeft u eveneens de mogelijkheid de TOBA 2 naar boven of beneden te verstellen. Deze knoppen kunt u gebruiken wanneer de handbediening niet meer functioneert.
- Rechts ziet u 2 gele/oranje lampjes. Wanneer deze gaan branden, betekent dit dat de TOBA 2 een servicebeurt nodig heeft. Dit is zodanig ingesteld dat de TOBA 2 goed wordt onderhouden, conform de wensen en eisen van de fabrikant. Neem contact op met de afdeling service van Doove Care Groep.
- Bovenop de accu vindt u een grote rode knop. Dit is de noodstop. Hiermee schakelt u het systeem direct volledig uit. Om de stopsituatie op te heffen, dient u de knoppen aan de zijkant van de accu in te drukken.





4. Schoonmaak

Om een goed product te garanderen, is het belangrijk dat een product wordt onderhouden. Hierin maakt de fabrikant onderscheidt in de volgende periodes.

- Reiniging voor gebruik
- Reiniging na gebruik
- Periodieke reiniging

Reiniging voor gebruik

Bij het leveren van de TOBA 2 dient de TOBA 2 gereinigd te worden voordat deze wordt gebruikt. Het reinigen dient actief te gebeuren door het personeel.

Reiniging na gebruik

Wij adviseren na gebruik door de cliënt de TOBA 2 altijd te reinigen. Middels deze wijze voorkomt men het uitwisselen en vermenigvuldigen van bacteriën welke in aanraking komen met de cliënt.

Periodieke reiniging

Wij adviseren de TOBA 2 periodiek grondig te reinigen. Periodiek betekent minimaal een jaarlijkse reiniging, waarin men de TOBA 2 extra nauwkeurig reinigt en alles tot in detail doorloopt. Dit zorgt voor een langere levensduur van de TOBA 2.



LET OP: Het is niet toegestaan de TOBA 2 te reinigen middels een wasstraat of een dergelijke methode. Dit leidt tot schade aan de elektrische componenten.



LET OP: Het is niet toegestaan de TOBA 2 te reinigen middels stoom reiniging. Dit kan schade aan de elektrische componenten tot gevolg hebben.



LET OP: Moeilijk te verwijderen plekken kunt u verwijderen middels een zachte borstel. Gebruik geen schuurspons.



5. Service en Onderhoud

Voor service en onderhoud kunt u zich wenden tot:

Doove Care Groep B.V
Wilhelminakade 10
2741 JV Waddinxveen
Telefoonnr: 0182-624990
E-mail: service@doove.nl

De TOBA 2 dient één keer per jaar door een vakkundig persoon te worden nagekeken, om de veiligheid en een lange levensduur te waarborgen. We adviseren u graag over onze onderhoudscontracten.



6. Technische specificaties

Specificaties	Technische gegevens
Instaphoogte	400mm (TOBA 2 Laag) 450mm (TOBS 2 standaard)
Verstelling	500mm
Totale breedte:	730mm Binnenmaat: 650mm
Totale Lengte stoel	900mm
Breedte zitting	430mm
Lengte zitting	430mm
Breedte rug	420mm
Lengte rug	400mm
Lengte armsteunen	570mm
Ondersteek	Optioneel beschikbaar
Max. gebruiksgewicht	150KG
Breedte voetplaat	360mm
Lengte voetplaat	200mm
Voetplaat	Opklapbaar
Verstelbaarheid voetplaat	120mm
Voetplaat	Afneembaar
Diameter wielen	100mm
Remsysteem wielen	Centraal geremd
Merk wielen	TENTE
Merk Elektrische onderdelen	LINAK

Vervangingsadvies onderdelen

Zitting	Jaarlijks
Rugleuning	3 jaar
Armleuningen	2 jaar
Accu	3 jaar
Liftmotoren	Indien nodig



7. CE Verklaring



TOBA 2

Wij,

Technicare Ridderkerk BV met de volgende eigenschappen:

Bedrijfsnaam: TechniCare Ridderkerk B.V.
 Handelsnaam: TechniCare
 Adres: Nikkelstraat 24
 Postcode: 2984AM
 Land: Nederland
 GS1 Prefix Code: 87193273974
 SRN Code: NL-MF-000005899

verklaren hierbij dat het CE-gemarkeerde product waar deze verklaring betrekking op heeft,

Product: TOBA Douchestoel 2
 Artikelnummer: 21.001.01
 Accessoires: Zie Bijlage I
 UDI-DI Code: 8720648522055
 SRN Code: 8720648522055
 GMN Code: 8719327397421.001.014G
 Basic UDI-DI Code (01)8720648522055(17)xxxxxx(10)xxx(21)xxxx



Is geclassificeerd als:

Medisch hulpmiddel klasse I volgens Annex XIII, Hoofdstuk III van Richtlijn EU/745 (MDR) met betrekking tot medische hulpmiddelen.

Het hulpmiddel dat onder deze verklaring valt is in overeenstemming van de verordening en voldoet aan de essentiële eisen van de Verordening onder verantwoordelijke van de fabrikant:

- EU 2017/745 (MDR) (Medische hulpmiddelen)
- NEN-EN 12182_2012 en
- EN60601-1:2006
- EN60601-1:2:2007
- NEN-EN-ISO 20417:2021

Producten die worden gedekt door deze Verklaring van conformiteit zijn toegevoegd aan de product referentielijst (zie bijlage I).

Handtekening:

Datum: 1-6-2022
 Naam: Arjan van de Voorde
 Functie: Directeur

2