



DOOVE CARE GROEP

Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 – 624 990

GEBRUIKSAANWIJZING TOBA2 DOUCHE-/TOILETSTOEL

De TOBA 2 is de nieuwe generatie douche- en toiletstoel en ontworpen om cliënten op een veilige, geborgen en ergonomische manier te wassen en te verzorgen.

Ingebruikname

- Controleer voordat u de cliënt in de TOBA 2 plaatst of de douchestoel centraal geremd is. Dit doet u door te voelen of de TOBA 2 niet te verrijden is. Ook tijdens gebruik dient de TOBA 2 altijd geremd te zijn. Middels het indrukken van het rempedaal worden alle vier de wielen tegelijkertijd centraal geremd.
- Controleer voorafgaand aan het liften of kantelen of de armleuningen van de TOBA 2 neergeklapt en naar voren zijn. Dit zorgt voor geborgenheid en veiligheid voor de cliënt.
- Zorg ervoor dat de cliënt na plaatsing op de TOBA 2 zijn/haar benen geplaatst heeft op de voetplaat en zijn/haar armen geplaatst heeft op de armleuningen.
- Zorg ervoor dat de voeten van de cliënt plat en recht op de voetplaat zijn geplaatst. Dit voorkomt knelgevaar.
- Zorg indien nodig voor het correct plaatsen van de pelotten voor een ergonomische en veilige zithouding voor de cliënt.
- Het is niet toegestaan de TOBA 2 te verrijden wanneer de stoel verhoogd danwel gekanteld is.
- Zorg ervoor dat voor gebruik de accu van de TOBA 2 afdoende is opgeladen in het daarvoor meegeleverde oplaadstation. De indicatoren op de accu geven de accuduur aan. Zorg ervoor dat er minimaal 2 streepjes voorafgaand aan de behandeling groen gekleurd zijn.
- De accu geeft een signaal wanneer service benodigd is. Contacteer hiervoor Doove Care Groep om de service en onderhoud van de TOBA 2 in te plannen.
- De TOBA 2 mag enkel gebruikt worden op vlakke ondergronden en niet op ondergronden met een hellingsgraad van +10 graden.

Voetensteun en armsteunen

De TOBA 2 beschikt over een voetensteun die volledig tot op de grond komt. Mobiele cliënten kunnen daardoor eenvoudig plaatsnemen op de TOBA 2, zonder dat u hoeft te bukken om de voetensteun op te klappen. De voetensteun kan daarnaast eenvoudig in hoogte worden versteld en is volledig afneembaar. De armsteunen zijn opklapbaar en wegklapbaar waardoor een (zijdelingse) transfer vanuit bed of (rol)stoel mogelijk is. Ook is de TOBA 2 lifttoegankelijk waardoor niet mobiele cliënten eenvoudig in de douchestoel geplaatst kunnen worden.



Fabrikant:
TechniCare
Nikkelstraat 24
2984 AM Ridderkerk
Nederland

DOOVE CARE GROEP

Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 – 624 990

Handbediening

Het heffen en kantelen van de cliënt vindt plaats via de afstandsbediening. Door op de toets met de pijl omhoog te drukken, gaat de douchestoel omhoog. Met de toets bij het icoontje met de pijl naar beneden gaat de douchestoel naar beneden.

Wanneer de douchestoel omhoog en omlaag gaat kantelt hij automatisch mee. Met de toetsen voorzien van een zittende en liggende stoel regelt u de zitpositie van de cliënt; van rechte zithouding tot kantelstand.

Noodstop

Bij een gevaarlijke situatie moet de noodstop worden ingedrukt. Deze grote rode knop bevindt zich bovenop de accu. Hiermee schakelt u het systeem direct volledig uit. Om de stopsituatie op te heffen, dient u de knoppen aan de zijkant van de accu in te drukken.

Elektrische nooddaling

Wanneer de handbediening niet meer functioneert kunt u met de twee bedieningsknoppen op de accu de TOBA 2 naar boven of beneden verstellen.

Mogelijke storingen

Indien de TOBA 2 niet werkt, raadpleeg dan bovenstaande tabel om de storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u aan de hand van onderstaande informatie het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.

Storing TOBA 2	Mogelijke oplossing
Heft of kantelt niet	<ul style="list-style-type: none">- Noodstop controleren- Stekkers controleren of deze goed vastzitten- Wisselaccu vervangen- Afstandsbediening op schade controleren en eventueel vervangen- Motor(en) vervangen
Wisselaccu laadt niet op	<ul style="list-style-type: none">- Controleren of de oplader in orde is- Wisselaccu controleren of omwisselen
De TOBA 2 beweegt langzaam op en neer	<ul style="list-style-type: none">- Wisselaccu bijladen of vervangen