



DOOVECAREGROEP

Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 - 624 990

GEBRUIKSAANWIJZING SENZA

Handbediening

Verstelling ruggedeelte omhoog of omlaag

Verstelling beengedeelte omhoog of omlaag

Verstelling rug- en beengedeelte tegelijk

Ligvlak omhoog en omlaag

Anti-Trendelenburg (comfortstand) omhoog



Blokkeren/Deblokkeren

De handbediening is voorzien van een kunststof sleutel die gebruikt wordt om de handbediening te (de)blokkeren. Als het lampje brandt zijn de functies actief, als het lampje uit is zijn de functies niet actief.

Voor het (de)blokkeren van de handschakelaar moet de sleutel in de achterzijde in het daarbij behorende slot worden gestoken. Draai de sleutel tot aan het symbool "slot open" (deblokkeren) of "slot dicht" (blokkeren).

CE Fabrikant:
LimaBeds BV
Nijverheidsweg 9
6691 EX Gendt
Nederland

DOOVE CARE GROEP

**Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 - 624 990**

Mechanische verstelling onderbeengedeelte

Het onderbeengedeelte kan handmatig in hoogte versteld worden. Pak hiervoor het uiteinde van het ligvlak bij de voetzijde vast en trek deze omhoog. Door een tandverstelling kan iedere gewenste hoogte ingesteld worden.

Om het onderbeengedeelte weer in vlakke stand terug te brengen pakt u het uitende van het ligvlak vast, brengt u deze in de hoogste positie en laat u het ligvlak daarna weer zakken.

Remmen en rijden

Het bed is verrijdbaar op iedere hoogte en in iedere positie. Het vastzetten van het bed vindt per as plaats met een 2 + 2 systeem of optioneel met een centraal remsysteem voor 4 wielen. De rempedalen bij de wielen zijn van elke kant goed bereikbaar. Door de remhefboom naar beneden te drukken worden de wielen geblokkeerd.

Mogelijke storingen

Indien de Senza niet werkt, raadpleeg dan onderstaande tabel om de storing op te sporen en te verhelpen. Wanneer u het probleem niet kunt verhelpen, neem dan contact op met Doove Care Groep.

PROBLEEM	MOGELIJKE OPLOSSING
Het bed reageert niet op gebruik van de handschakelaar	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of het netsnoer goed aangesloten is- Controleer of er spanning op het stopcontact zit- Controleer of de handbediening niet geblokkeerd is- Controleer of de handbediening of netkabel defect is; neem contact op met Doove Care Groep
Hoogteverstelling naar boven functioneert niet	<ul style="list-style-type: none">- Controleer of het bed niet overbelast is en let op maximaal gewicht van 175 kilo
Wielen remmen of draaien niet	<ul style="list-style-type: none">- Verwijder vreemde voorwerpen