



DOOVE CARE GROEP


Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 - 624 990

GEBRUIKSAANWIJZING QUATTRO PLUS

De Quattro Plus is een systeem dat het bestaande matras vervangt.

1. Leg het Quattro Plus matras op een leeg bed met de afbeelding van de voeten aan de bovenkant aan het voeteneinde.
2. Bevestig het matras met de riemen aan het bed om te voorkomen dat het matras losschuift van het bed.
3. Stel de ophangbeugels van de pomp in en hang hem aan het voeteneinde van het bed. Om de beugels in te stellen drukt u de beugels in en draait ze op de gewenste positie. Als u de beugels hierna loslaat zijn ze vergrendeld.
4. Sluit de luchtslang aan op de pomp. Plaats het zwarte streepje op de aansluiting van de luchtslang tegenover het zwarte streepje op de pompaansluiting en druk deze vast. Draai de slangaansluiting met de klok mee vast tot de groene stip in het gaatje verschijnt. Controleer of de luchtslangen niet geknikt zijn.
5. Steek de plug van het netsnoer in de linkerkant van de pomp en steek de stekker in het stopcontact. Leid het netsnoer door de kabelgoot aan de zijkant van het matras zodat hij niet op de grond komt te hangen.
6. Schakel het systeem in door de schakelaar op de AAN- stand te zetten.
7. Op het display verschijnt eerst OPSTARTEN en daarna AUT. INSTELLING terwijl het matras zich vult (dit duurt ongeveer 15 minuten).
8. Als het systeem gevuld is start de pomp automatisch in de dynamische stand met medium comfort.
9. Maak het bed op maar stop het onderlaken niet te strak in. Stevig ingestopte lakens verminderen de werking van het matras.
10. Bij reanimatie kan het matras snel ontlucht worden door de CPR draaiknop aan de zijkant van het matras open te draaien. Let op dat de draaiknop weer gesloten is als het matras opnieuw ingezet wordt en de CPR altijd bereikbaar is.
11. Met de transportstand kan het matras bij transport (of een stroomstoring) op druk gehouden worden. Druk op de knop MAX (1). Wacht tot het matras volledig gevuld is en draai dan de luchtslang, die in de zijkant van de pomp zit, tegen de klok in (2) en haal hem eruit (3). De lucht blijft nu in het matras. Haal de stekker uit het stopcontact en het bed is klaar voor transport.

LET OP: sluit na transport de luchtslang weer aan, stop de stekker in het stopcontact en zet de pomp weer aan. Anders loopt het matras langzaam leeg.

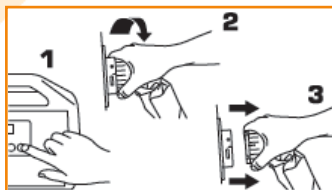

REINIGEN UITSLUITEND MET WATER EN EEN OPLOSSING VAN ZACHTE ZEEP

CE Fabrikant:
TALLEY GROUP LTD
Premier Way
SO51 9AQ Romsey
Engeland

DOOVE CARE GROEP

Meld een storing via KIS portaal,
Scan&Go app of bel naar 0182 - 624 990



THERAPIE STAND

De Quattro Plus heeft een dynamische stand (1- in 4 cyclus), en statische stand (constante lage druk). Door de knop THERAPY STAND ingedrukt te houden kan er tussen beide standen gewisseld worden. De pomp start automatisch in de dynamische stand.



COMFORTREGELING

Het comfort van het matras kan veranderd worden door middel van de op- of neergaande pijltjes. (zacht/ medium/ hard/ zitmodus). De pomp start automatisch in stand medium.



ALARM/ TOETSVERGREDELING

Een alarmmelding kan verwijderd worden door de MUTE knop in te drukken. Indien de MUTE knop ingedrukt wordt na een stroomstoring of uitschakeling van de pomp zijn de ingestelde functies verwijderd. De pomp start dan weer automatisch in de dynamische stand. NB: als de pomp binnen 12 seconden weer wordt aangezet en er niet op de MUTE knop is gedrukt, keert het systeem terug naar de laatst ingestelde therapie stand.

Door de MUTE knop ingedrukt te houden wordt de toetsvergrendeling ongedaan gemaakt en verdwijnt 'L' uit het display.



MAX. VULLING

Door de knop MAX. INFLATE in te drukken vult het matras zich maximaal gedurende 15 minuten. Op het display verschijnt EVEN WACHTEN gevolgd door KLAAR en een alarm van 5 seconden als het matras geheel gevuld is. Om terug te keren naar de vorige functie drukt u nog een keer op de knop MAX. INFLATE. Na 15 minuten gaat het systeem automatisch terug naar de ingestelde therapie stand.

Een foutmelding kan ongedaan gemaakt worden door de ALARM knop in te drukken. Indien de foutmelding hierna niet verdwijnt, zoek dan naar de mogelijke oorzaak of

*neem contact op met Doove Care Groep.

| FOUTMELDING | MOGELIJKE OORZAAK |
|---------------|--|
| Stroomstoring | - De stroom is uitgevallen - De stekker is uit het stopcontact getrokken - De pomp is uitgeschakeld |
| Lage druk | - Het matras is niet goed op de pomp aangesloten - Het CPR- ventiel is niet goed gesloten - De luchtslangen zijn geknikt - De onderlinge celverbindingen zijn niet correct of er zitten gaatjes in de cellen* |
| Cyclusstoring | - De automatische sequentiële cyclus is tot stilstand gekomen. Schakel de pomp uit, druk op MUTE en zet het systeem weer aan. Neem contact op met Doove Care Groep als de foutmelding zich herhaalt. |